

# NÁVOD


## K POUŽITÍ AUTOINJEKTORU GAI

VEB VERPACKUNGSMITTELWERK  
SCHWERIN

27.09.79

### Návod k použití autoinjektoru GAI

kytka

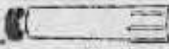

šele pojistky



pojistka

dolní díl horní díl

**AUTOINJEKTOR NESPOUŠTĚT BEZ NÁPLNĚ!**  
Směr otáčení (šroubování) udán podle šipky na čele pojistky

### A. Příprava autoinjektoru k prvnímu použití


1. **nezahazuj obal a návod**
2. **odšroubuj horní díl od dolního** otáčením **proti směru šipky** na pojistce



3. **odjistí** otáčením černé pojistky asi o jednu otáčku **ve směru šipky** na pojistce na doraz



4. **zatlač** vyčnívající vidlici do horního dílu kolmým tlakem **proti drsné podložce** na doraz

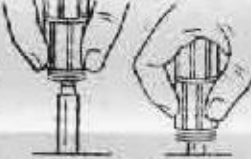


5. **zajisti** otočením černé pojistky **proti směru šipky** na pojistce na doraz



6. **vyjmi náplň z jejího obalu, vlož ji do dolního dílu** a lehce poklepej na jeho stěnu



7. **přišroubuj** k naplněnému dolnímu dílu horní díl otáčením **ve směru šipky** na pojistce. Dbej na správné

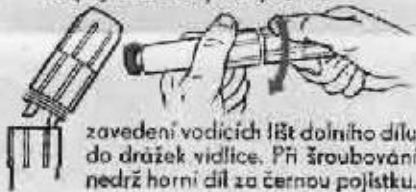

zavedení vodičů IBT do dolního dílu do drážek vidlice. Při šroubování nedrž horní díl za černou pojistku.

8. **ulož** autoinjektor s návodem zpět do obalu

### B. Návod k použití autoinjektoru

1. **odjistí** otáčením černé pojistky asi o jednu otáčku **ve směru šipky** na pojistce na doraz



2. **přitlač** autoinjektor kolmo červenou krytkou na přední nebo vnější předovou část stehna (mimo žev a kapsu)



3. **vyčkej** asi **5 sekund** a vytáhni autoinjektor ze tkáně

### C. Příprava autoinjektoru k opakovanému použití

1. **odšroubuj** horní díl od dolního otáčením **proti směru šipky** na pojistce



2. **vyjmi** použitou náplň z vysunuté vidlice **vyvrácením** do boku a **zahaž ji**



3. **dále postupuj** podle návodu A, body 4 až 8